



Mannequin Connecté PRESTAN

» Mannequin Adulte avec connexion Bluetooth

Le mannequin de formation adulte PRESTAN Série 2000 intègre le **moniteur de fréquence connecté Bluetooth**. Le moniteur indique en temps réel la **fréquence, la profondeur, la décompression** ainsi que les **ruptures de massage et la qualité des insufflations** sur votre mobile ou tablette.

Couplé à l'application gratuite « **Prestan CPR Feedback** », le capteur de RCP Bluetooth permet d'analyser les performances de RCP jusqu'à six apprenants. Un rapport peut être généré en fin de cycle pour analyser les performances de chaque apprenant.

Le mannequin est livré avec 10 poumons, une fiche d'instructions et une housse de transport en nylon.

Référence : PP-AM-2000
Garantie : 1 an
Tarif : 240,00 € HT



Advanced CPR Feedback
Bluetooth connection




App Store

Google Play

Mannequin Connecté PRESTAN

Mannequin adulte avec connexion Bluetooth - Réf. PP-AM-2000

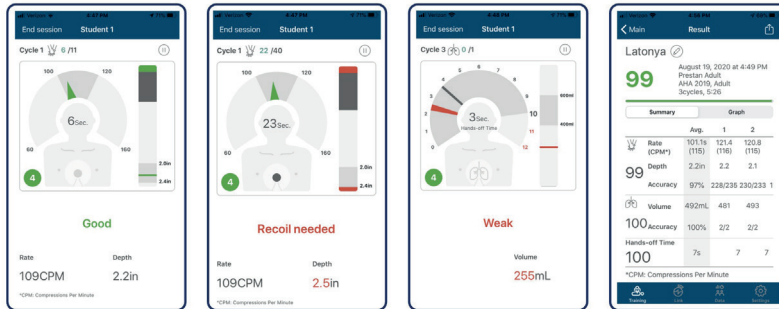

L'application PRESTAN CPR Feedback répond aux exigences les plus récentes éditées par l'American Heart Association (AHA) en matière d'apprentissage de la RCP.



APPLICATION GRATUITE
DISPONIBLE EN FRANÇAIS




Le mannequin adulte connecté série 2000 offre une solution de formation à double usage. Les formateurs ont la possibilité de former avec le **moniteur de fréquence classique** (diode lumineuse intégré dans l'épaule), ou d'utiliser le **moniteur connecté Bluetooth** pour analyser avec précisions les performances des apprenants sur un cycle de massage.

Le moniteur de fréquence signale en permanence la progression du massage, confirmant que les **compressions se situent entre 100 à 120 compressions par minute** conformément aux recommandations. Un bip indique également lorsque les **compressions thoraciques sont comprises entre 5 et 6 cm**.



Les voies respiratoires du mannequin connecté série 2000 (Réf. PP-VALB-10) intègrent un **capteur de respiration pour analyser la qualité des insufflations** via l'application PRESTAN CPR Feedback. Les formateurs ont la possibilité d'utiliser les voies respiratoires classiques (Réf. PP-ALB-50) sans retour d'information sur la ventilation réalisée.

CPR FEEDBACK

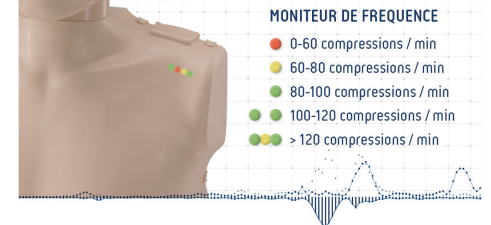

COMPRESSIONS

- Conformes aux directives ERC 2015,
- Testé à 500.000 compressions
- Compression entre 5 et 6 centimètres
- Un retour audio indique la bonne profondeur des compressions
- La force de compressions réaliste mesurée à 40 kg
- Retour sur la qualité de la RCP avec le moniteur de fréquence
- Retour sur la qualité de la RCP avec le moniteur de fréquence Bluetooth

INSUFFLATIONS

- Capacité pulmonaire de 700/1000 ml
- Soulèvement de la poitrine visible
- Bascule de tête pour Libération des Voies Aériennes (LVA)
- Bascule de tête nécessaire pour la pratique des insufflations
- Retour automatique de la tête pour ne pas rester en position inclinée
- Les narines du mannequin peuvent être pincées.
- Testé à 50.000 inclinaisons de la tête/redressement du menton

ANATOMIE

- Repères anatomiques réalistes : clavicules, ligne mamelonnaire précise, sternum et un processus xiphoïde apparent.
- Nombril visible pour compressions abdominales
- Cou entièrement formé pour simuler la vérification du pouls carotidien

POIDS ET DIMENSIONS

- Poids : 2.2 kg (mannequin avec sacoche)
- Taille : 62 cm (tête installée) x 34 cm x 15 cm

DECONTAMINATION

- Lingettes désinfectantes de type WIP ANIOS
- Solution 15ml de javelle diluée dans 1 litre d'eau
- Les voies respiratoires et les protecteurs faciaux ne sont pas réutilisables.

ALLERGIES

- Le mannequin, composant et accessoires ne contiennent pas de latex

DefibFrance SARL
Importateur Prestan et Defibtech
63, rue Gambetta
92150 Suresnes
Tél : 01 75 61 04 70
Fax : 01 75 61 04 72
info@prestan.fr

WWW.PRESTAN.FR

